


## Étapes de désinfection des visières « Hors établissement de santé »

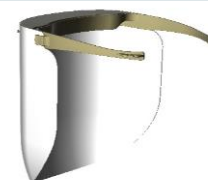

<b>1</b>	Revêtir l'équipement de protection individuelle (ÉPI) (blouse jaune, gants, masque de procédure et visière) s'il y a lieu.											
<b>2</b>	Remplir l'évier avec de l'eau et mettre un peu de savon à vaisselle.											
<b>3</b>	Déposer la visière dans l'évier et remplir d'eau savonneuse. Frotter grossièrement celle-ci avec un linge doux. (Jeter les visières brisées ou altérées) Ne pas démonter la visière, mais retirer l'élastique et le jeter.											
<b>4</b>	Vider l'évier et rincer la visière abondamment à l'eau claire. Laisser la visière dans l'évier.											
<b>5</b>	Remplir à nouveau l'évier avec de l'eau tiède. Ajouter de l'eau de javel selon le tableau suivant :											
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Désinfectant</th> <th>Dilution</th> <th>Temps de contact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hypochlorite de sodium 6 % (eau de javel)</td> <td>100 ml par litre d'eau</td> <td>1 minute</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OU</td> </tr> <tr> <td>Hypochlorite de sodium 12 % (eau de javel)</td> <td>50 ml par litre d'eau</td> <td>1 minute</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Maintenir les visières immergées et nettoyer toutes les surfaces avec un linge doux.</li> <li>○ Laisser un temps de contact de 1 minute.</li> </ul>	Désinfectant	Dilution	Temps de contact	Hypochlorite de sodium 6 % (eau de javel)	100 ml par litre d'eau	1 minute	OU			Hypochlorite de sodium 12 % (eau de javel)	50 ml par litre d'eau
Désinfectant	Dilution	Temps de contact										
Hypochlorite de sodium 6 % (eau de javel)	100 ml par litre d'eau	1 minute										
OU												
Hypochlorite de sodium 12 % (eau de javel)	50 ml par litre d'eau	1 minute										
	<b>OU</b> Essuyer la visière avec un linge propre. Par la suite, utiliser une lingette désinfectante (de type « Lysol ») pour nettoyer toutes les surfaces de la visière. Laisser agir 1 minute et passer directement à l'étape 7.											
<b>6</b>	Déposer la visière désinfectée sur une surface propre et l'essuyer avec un linge propre. Vider l'évier. * <i>Rincer la visière avec de l'eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit.</i>											
<b>7</b>	Retirer l'ÉPI en procédant à l'hygiène des mains entre chaque retrait d'équipement.											
<b>8</b>	Lorsque la visière est sèche, placer un nouvel élastique entre les 2 extrémités d'ailettes et vous pouvez l'utiliser de nouveau. Si son usage est non prévu à court terme, ranger la visière dans un sac ou un contenant pour la garder propre. Inscrive sur le sac ou le contenant «Visière propre».											

Validé par Catherine Roy, chef de la PCI (2020-05-26)